



SYST'AM® P951D / Das RÜCKENKISSEN

SPRITZGEFORMTES RÜCKENKISSEN AUS VISKOELASTISCHEM SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS NACH DEM MULTITRAGFÄHIGKEITSPRINZIP

MATERIALIEN

80
kg/m³



Visko
Schaumstoff



Abnehmbarer
atmungsaktiver
Bezug

Reinigung des Schaumstoffes:



(Nicht unter Wasser tauchen)

Reinigung Bezug:



INDIKATIONEN

Für Personen mit Haltungsdefizit in Sitzposition:

Schädigungen des Zentralnervensystems (Apoplexie, Schädeltraumata), Teilausfall des Nervensystems, orthopädische Einschränkungen, Vasomotorenlähmung, ...

- Verbesserte Positionierung im Stuhl
- Vermittelt der Sitzposition im Stuhl
- Verringert das Nach-Vorne-Rutschen
- Unterstützt die Linderung von Rückenschmerzen
- Schafft Druckentlastung an den Dornfortsätzen der Wirbelsäule




EIN UNIVERSALES BEFESTIGUNGSSYSTEM

→ Erlaubt die Anpassung des Rückenkissen an die meisten Rollstuhlmodelle.

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



P951D / Rückenkissen
Mit Bezug.

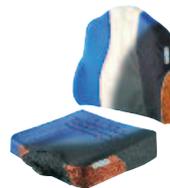

Therapeutische Combi-Packs
(S. 48)

BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR	GRÖßEN (H x B x D)
SYST'AM® P951D	Small	P951DS1HW 44 x 39 x 9 cm
	Standard	P951DIHW 49 x 44 x 9 cm
	Large	P951DL1HW 49 x 50 x 10 cm



Gewährleistung





IST EINE MIT DEM KISSEN ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI DER PRÄVENTION VON DEKUBITUS ABSOLUT KOMPLEMENTÄRE VORRICHTUNG

- Entlastet in beachtlichem Maße die Stützpunkte des Wirbelbereichs.
- Vermindert aufgrund einer Verringerung der sagittalen Instabilität ("nach vorne Gleiten") das Risiko des Auftretens von Dekubitus im Kreuzbein-Steißbein-Bereich.
- Verringert dank eines besseren Halts die Reib- & Scherkräfte.

EINE SPEZIFISCHE ANATOMISCHE FORM

- Wahrt die sich aus einer Kyphose ergebende spezifische Rückenmorphologie.
- Wahrt die Wölbung der Lendenwirbelsäule, was ein wichtiger Haltungsfaktor ist.

ERHÖHTER KOMFORT DES PATIENTEN IM ROLLSTUHL

- Laterale Wülste zum Schutz gegen den Kontakt mit den Röhren.

BEZUG



→ Laterale Wülste zum Schutz gegen den Kontakt der Röhren mit dem beim Einsatz häufig schmerzhaften Achsel- /Rückenbereich



→ Ein universales Befestigungssystem erlaubt die Anpassung des Rückenkissen an die meisten Rollstuhlmodelle



→ Sehr widerstandsfähiger technischer Stoff, der gegenüber den Bereichen mit starker Abrasionsbeanspruchung



VISKOELASTISCHER MULTITRAGFÄHIGER SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS



→ Trägt zur Übertragung der Risikostützbereiche auf Bereiche mit geringerem Risiko bei.

WEIßER SCHAUMSTOFF:

(geringere Tragfestigkeit) Erlaubt eine Freisetzung des Spitzendrucks des Rückenbereichs. Begünstigt die morphologische Abformung.





BLAUER SCHAUMSTOFF:

(erhöhte Tragfestigkeit) Erlaubt die Entlastung der Risikostützbereiche. Verstärkt die laterale Stabilität.

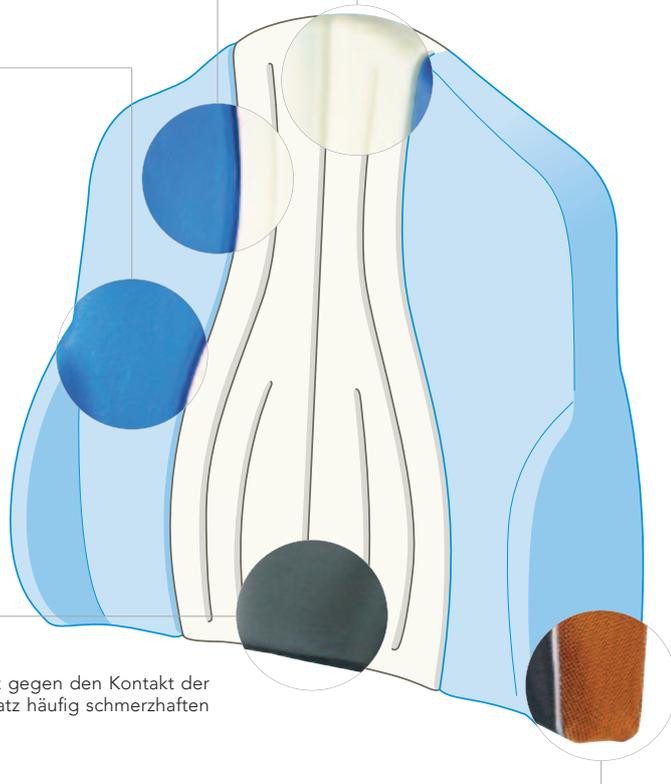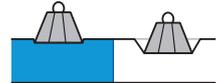

VERBESSERUNG DER POSITIONIERUNG UND STABILITÄT DES PATIENTEN

→ Ein Abstützen des Beckengürtels ermöglicht es dem nach vorne Gleiten (sagittale Instabilität) und der Sturzgefahr vorzubeugen, beide stellen permanente Probleme in der häuslichen und professionellen Pflege dar.

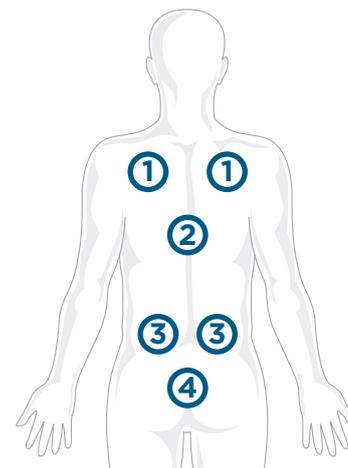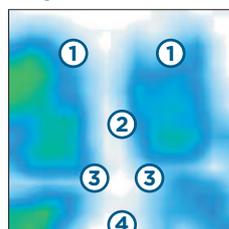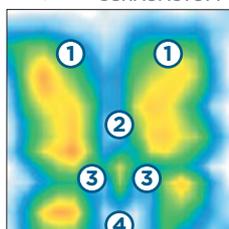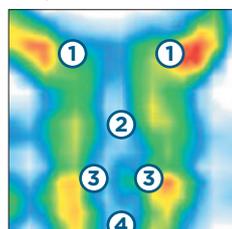


- ① SCHULTERBLÄTTER / SCHULTERN
- ② RÜCKENBEREICH
- ③ LENDENBEREICH
- ④ KREUZBEIN-STEISSBEIN-BEREICH




SYST'AM® THERAPEUTISCHE COMBI-PACKS FÜR DEN ROLLSTUHL


STELLEN SIE IHREN PACK SELBST ZUSAMMEN

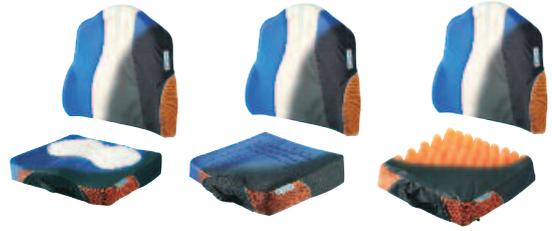

1 Nehmen Sie die Sitzmaße auf Tiefe / Breite

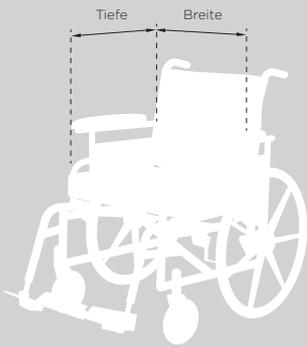


2 Wählen Sie die passende Größe aus

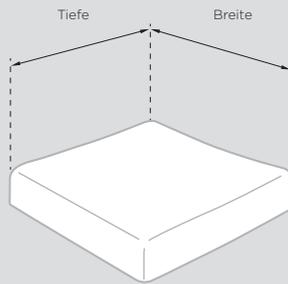

3 Wählen Sie das ausgesuchte Kissen in der passenden Größe aus




4 Bestimmen Sie die Rückenkissen Größe

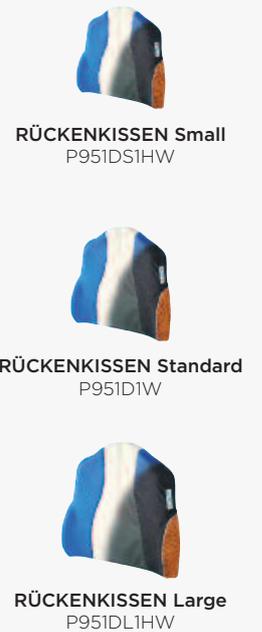


EMPFEHLUNGEN

→ Wählen Sie eine größere Sitztiefe (2-3 cm), wenn Sie ein Rückenkissen benutzen.

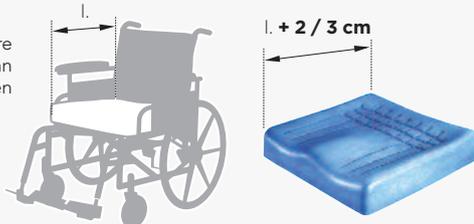

→ Das Rückenkissen immer auf das Kissen

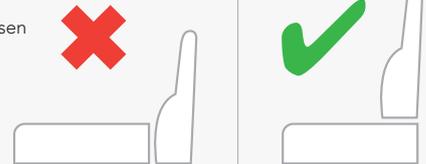



ROLLSTUHL-BREITE (cm)	30/32	34/36	38		40 - 42				43/44		45 - 46				48/50		55	60					
VERFÜGBARE GRÖßEN (cm)	32 x 32 cm	36 x 36 cm	38 x 38 cm	38 x 43 cm	40 x 40 cm	40 x 43 cm	40 x 46 cm	42 x 42 cm	42 x 46 cm	42 x 50 cm	43 x 43 cm	43 x 46 cm	45 x 42 cm	45 x 43 cm	45 x 46 cm	45 x 50 cm	46 x 40 cm	46 x 46 cm	48 x 43 cm	51 x 46 cm	51 x 50 cm	56 x 46 cm	61 x 50 cm

ÜBERSICHTTABELLE «KISSENART/ GRÖßEN»

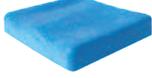
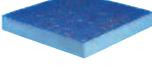
 P371C HR-FOAM-Kissen								●					●		●						●			
 P311C SYST'AM GEL / SYST'AM DUOGEL®					●			●					●	●										
 P314C MIXTE					●									●										
 P341C DUOFORM®		●						●	●				●		●						●			
 P361C VISCOFLEX®		●	●		●			●	●				●		●					●	●	●		
 P361CP VISCOFLEX®+ mit Abduktionskeil								●					●		●									
 P361CA VISCOFLEX®+	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●				●	●	●	●	●
 P361CR VISCOFLEX® AIR								●					●		●									
 P301C POLYAIR® 60 Zweikammer (●) Einkammer (●)		●			●	●	●					●	●				●	●		●	●	●	●	●
 P302C POLYAIR® 100 Zweikammer (●) Einkammer (●)					●	●	●					●	●				●	●		●	●	●	●	●

TABELLE DER ZUSAMMEN GEHÖRENDE GRÖßEN

 P951D RÜCKENKISSEN Small	+	+	+	+																				
 P951D RÜCKENKISSEN Standard		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
 P951D RÜCKENKISSEN Large								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			